

# Betriebsstundenabfrage BiPAP A30S; BiPAP A30; BiPAP A40 Silver-Line


14.24.09.0039 • 14.24.09.0040 • 14.24.13.1003



## Standby-Bildschirm



## Tastenbeschreibung / -belegung

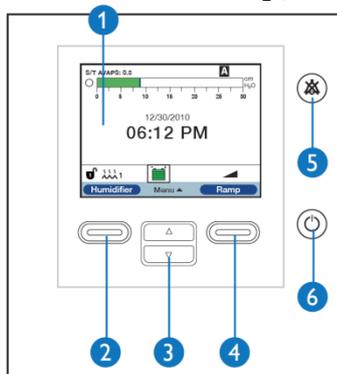


- 1 Bildschirm (Display)
- 2 Abbrechen; Menü verlassen; Befeuchterstufen einstellen
- 3 Navigieren in Menüs oder Ändern von Einstellungen
- 4 Auswählen/Ändern/Bestätigen von Parametern; Aktivieren der Rampe
- 5 Stummschalttaste
- 6 Start/Stop-Taste

- Gerät am Stromnetz angeschlossen
- 1x Start/Stop-Taste (6) drücken; Warten bis nach ca. 2 Sekunden der Standby-Bildschirm erscheint.
- Menü-Taste (3) 1x hoch drücken
- Mit der „Navigieren“-Taste (3) nach unten auf „Informationen“ steuern und „Auswählen“ (4) drücken.
- 8x „Seite“ (3) runter drücken bis im Display „Therapiezeit“ zu sehen ist. \*1



Therapiezeit  
=  
Patientenbetriebsstunden

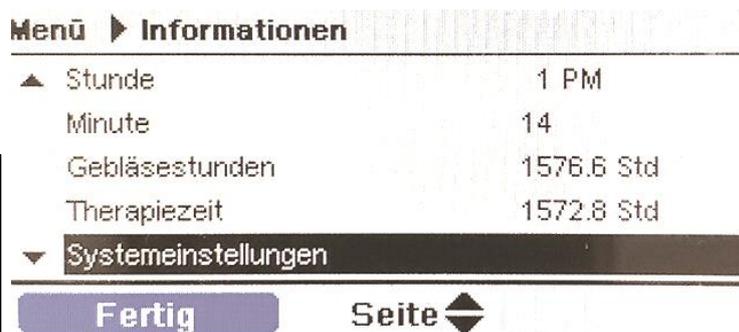

- Menü verlassen: 1x Taste „Fertig“ (2) drücken und anschließend 1x die Taste „Beenden“ (2) drücken = Standby-Bildschirm \*2

### Zusatzinformation

#### \*1Therapiezeit

Diese Einstellung zeigt die Gesamtzeit an, während der der Patient eine Therapie erhalten hat.

#### \*1Gebläsestunden

Zeigt die Anzahl der Stunden an, während der das Gebläse aktiv war, seit dieser Wert das letzte Mal zurückgesetzt wurde.

\*2Gerät geht nach einiger Zeit in den Standby-Modus